

Augen-Notfallplan



Nehmen Sie die Flasche aus der Box.



Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht.



Den Kopf zurücklehnen und spülen oder ...



... den Kopf nach vorne beugen und spülen.

Empfohlene Spüllösungen je nach Schmutz- und Schadstoffeinwirkung

Schmutz- und Schadstoffeinwirkung	Empfohlene Spüllösung	Fortsetzung der Spülung bis zur ärztlichen Behandlung	Empfohlene Spülung
Fremdkörper z. B. Staub, Späne, Körner, Metall- und Holzsplitter	Sterile Augenspülung 500 ml Art.-Nr. 5409 32	Sterile Augenspülung 500 ml Art.-Nr. 5409 32	Augen solange mit der Augenspülung spülen, bis die Fremdkörper herausgespült sind.
Säureschäden	pH Neutral Phosphatlösung 200 ml Art.-Nr. 5409 33	Sterile Augenspülung 500 ml Art.-Nr. 5409 32	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Augenspülung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Alkalische Schäden	pH Neutral Phosphatlösung 200 ml Art.-Nr. 5409 33	Sterile Augenspülung 500 ml Art.-Nr. 5409 32	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Augenspülung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Sonstige Schäden z. B. Lösemittel und Öle	Sterile Augenspülung 500 ml Art.-Nr. 5409 32	Sterile Augenspülung 500 ml Art.-Nr. 5409 32	Augen solange mit der Augenspülung spülen, bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist. Die Spülung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.

Hinweise und Gesetze zum Augenschutz

Wichtig!

Bei allen Schäden soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspüllflasche während des Spülvorgangs nur leicht zusammen drücken! Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder Verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte während des Transports zum Arzt fortgeführt werden. Sterile Augenspüllösungen sind für einmaligen Gebrauch bestimmt. Bei Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko.

Unfälle mit Säuren und Alkalien

Bei diesen Unfällen beginnt die Verätzung bereits in dem Augenblick, wenn die Substanz mit dem Auge in Kontakt kommt. Für diese Art von Verletzungen empfehlen wir den Einsatz von pH Neutral.

Haltbarkeit (MHD)

Ungeöffnet sind die sterilen Augenspüllösungen drei Jahre einsetzbar. Es ist keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich. Das Haltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Etikett.

Arbeitsschutzgesetz § 3

Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zum Arbeitsschutz zu organisieren und geeignete Mittel zur Verfügung zu stellen, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz im Betrieb zu verbessern. Die Beschäftigten haben die zur Verfügung gestellten persönlichen Schutzausrüstungen zu verwenden.

Arbeitsstättenverordnung § 39

In Abhängigkeit von der Gefahrenart (z. B. beim Umgang mit Säuren und Laugen) müssen Augenwaschflaschen zur Verfügung stehen.

Unfälle mit Fremdkörpern

Bei mechanischen Verletzungen, verursacht z. B. durch Metall- und Holzsplitter, Schmutz, Staub und andere Fremdkörper, ist die Zeit auch ein wichtiger Faktor. In diesem Fall kann eine sofortige Spülung verhindern, dass sich die Fremdkörper im Auge festsetzen und schwere Augenschäden auftreten. Hier ist unsere Augenspüllösung mit 0,9 % Natriumchlorid die richtige Wahl.

Gefahrguttransporte

Verpflichtung des Speditionsgewerbes, jeden Gefahrguttransporter mit einem Autoverbandskasten gemäß DIN 13164 auszustatten, der um eine Augenspüllflasche, Schutzbrille u. a. erweitert ist.

DIN EN 15154-4

Regelt u. a. die Leistungs- und Funktionsanforderungen sowie Gebrauchsinformationen für Augenduschen ohne Wasseranschluss.